



TERMOMETRO ORAL (MERCURIAL)

● CAT: TE 0495 ●



ESPECIFICACIONES

TERMÒMETRO DE MERCURIO PRISMÀTICO, PARA MEDIR LA TEMPERATURACORPORAL QUE COMPRENDE DIVISIONES DE DECIMAS DE GRADO ENTRE 32° c 42° c. CUERPO DE VIDRIO, DE FÀCIL VISIBILIDAD, MARCACION CLARA Y VISIBLE. ENVASE DE PLÀSTICO PARA TRASPORTE.

DIMENCIONES

- * LONGITUD TOTAL 101.5 mm + 10%.
- * DIAMETRO DEL BULBO 5 mm + 10%.V

INDICACIONES DE USO

- * LIMPIE EL TERMÒMETRO CON ALCOHOL ANTES DE USARLO.
- * CERCÌORESE QUE EL MERCURIO ESTE DEBAJO DE LA ESCALA NUMÈRICA, EN CASO CONTRARIO, TOME EL TERMÒMETRO POR LA PARTE SUPERIOR Y CON MOVIMIENTOS VIGOROSOS HAGA DECENDER EL MERCURIO.
- * PUEDE SER UTILIZADO PARA TOMAR LA TEMPERATURA EN FORMA AXILAR U ORAL. MANTENGA EL TERMÒMETRO MÌNIMO 3 MINUTOS MINIMO PARA UNA LECTURA MÀS PRECISA.
- * DESPUÈS DE ESTO, OBSERVE EN QUÈ POSICÌON SE ENCUENTRA EL MERCURIO CON RELACÌON A LA ESCALA NUMÈRICA, Y ASÌ DETERMINAR LA TEMPERATURA DEL PACIENTE.
- * SE RECOMIENDA GUARDAR EL TERMÒMETRO EN SU ESTUCHE PARA EVITAR QUE ÈSTE SE ROMPA.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, PRODUCTO DESCARTABLE DE UN SOLO USO, NO USAR SI EL PRODUCTO SE ENCUENTRA ABIERTO O DETERIORADO.